




A-Rehu

TRU-TEST®
Scandinavia

Korvamerkkien kiinnitysohje

OIKEA KORVA

VASEN KORVA

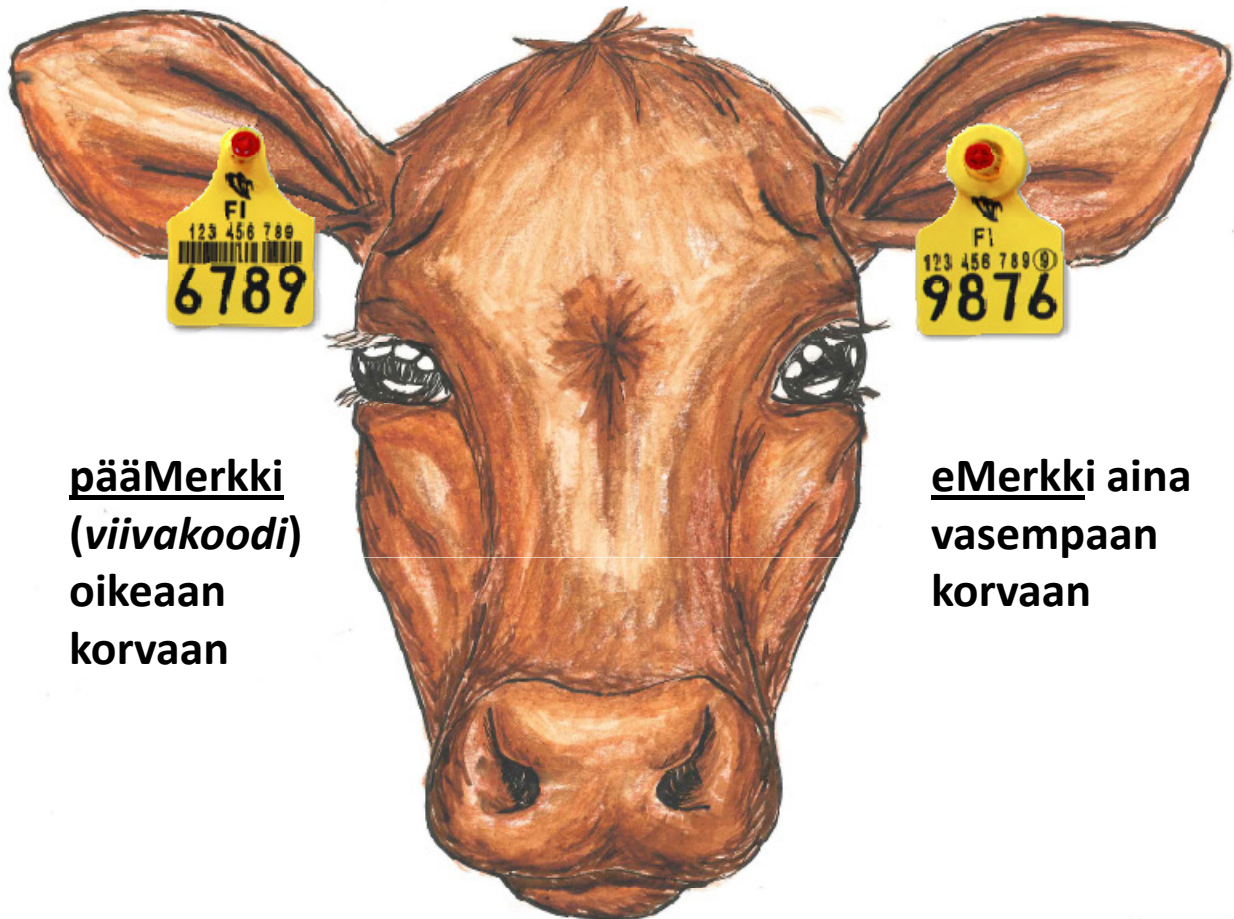

pääMerkki
(viivakoodi)
oikeaan
korvaan

eMerkki aina
vasempaan
korvaan

- Korvamerkit kiinnitetään korvalehden **keskelle laskimoiden** väliin.
- Piikillinen **urospuoli** tulee korvan **takapuolelle** ja **naaraspuoli (punaisen lukitus)** korvan **sisäpuolelle**.



eLappu ja muut eMerkit kiinnitetään **AINA VASEMPAAN KORVAAN**

- Ole huolellinen korvamerkkien kiinnityksessä:
 - Käytä joko Caisley -pihtejä tai punaisia Allflex -pihtejä, joihin on vaihdettu merkkiin sopiva neula (Caisley)
- Väärä tai puutteellinen kiinnitys voi vahingoittaa vasikan korvaa




A-Foder

TRU-TEST®
Scandinavia

Fastsättningsinstruktioner för öronmärken

HÖGER ÖRA

VÄNSTER ÖRA

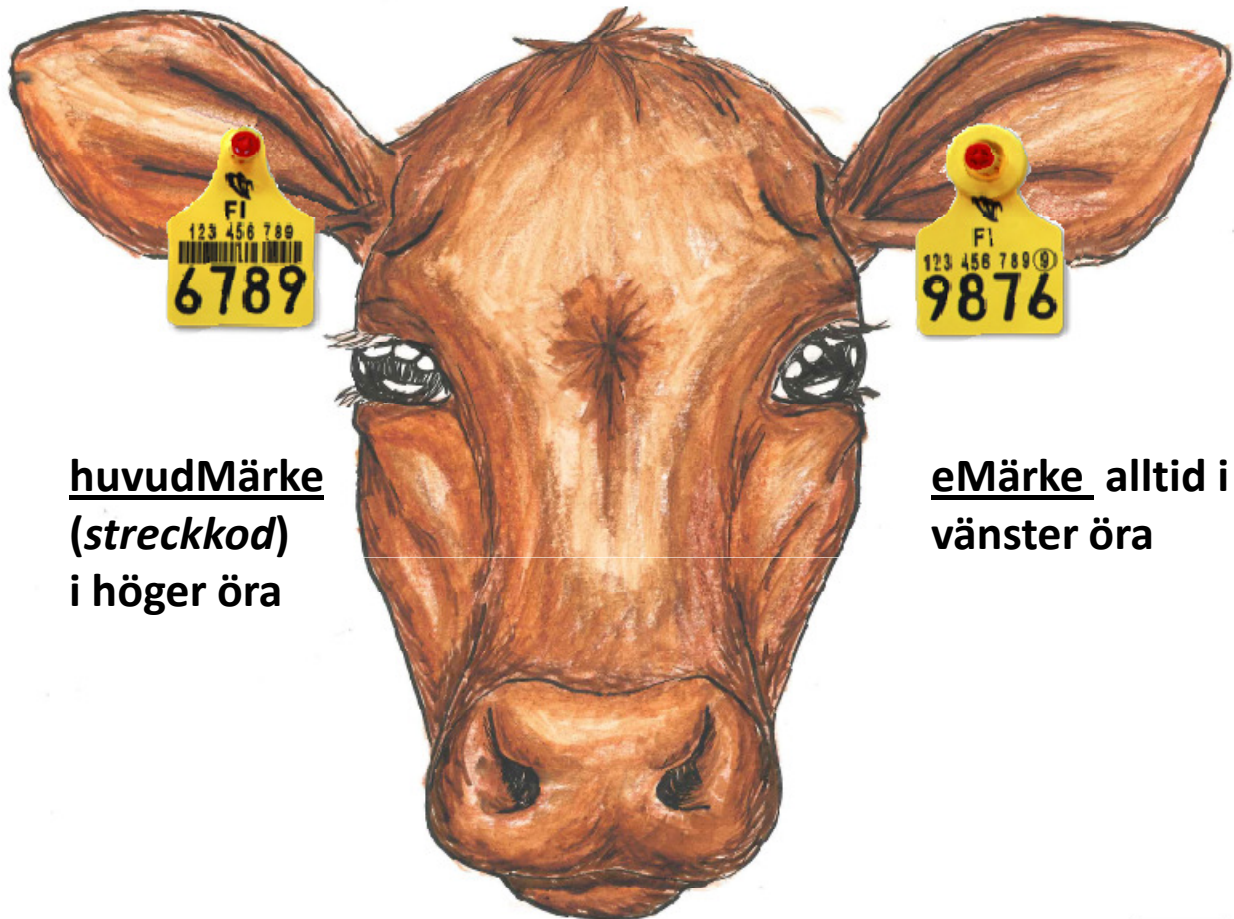

huvudMärke
(*streckkod*)
i höger öra

eMärke alltid i
vänster öra

- Öronmärkena placeras mitt i örat **mellan venerna**
- **Han-delen** med pigg placeras på **baksidan** av örat och **hon-delen** (**med röda lås**) på **insidan** av örat.

! eLapp och andra eMärken fastsätts ALLTID I VÄNSTER ÖRA

- Vara aktsam när öronmärkena sätts fast:
 - Använd antingen Caisley –tång eller röd Allflex -tång, i vilken är fastsatt motsvarande nål som passar märket (Caisley)
 - Felaktig eller bristfällig fastsättning kan skada kalvens öra